

## GRPro 2.1 - Instrucciones de uso

### Paso 1

Pulse el botón de apertura de la puerta del depósito de hielo para abrirla.




### Paso 2

Añada agua a la línea de llenado indicada en la etiqueta que se encuentra dentro del depósito. **NO LLENAR EN EXCESO.** Añada hielo a la parte superior del depósito.




### Paso 3

Cierre la puerta del depósito de hielo. Asegúrese de escuchar un chasquido.

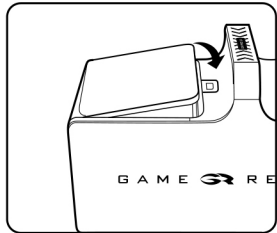


### Paso 4

Conecte el adaptador de CA al receptáculo del panel extremo de la unidad de control y luego a un enchufe eléctrico. La luz indicadora de alimentación (color naranja) en la unidad de control deberá iluminarse. Pulse el botón de encendido. La pantalla deberá iluminarse y la unidad de control deberá emitir dos pitidos.

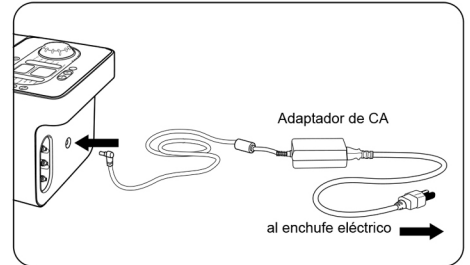



### Paso 5

Conecte el extremo más grande de la manguera de conexión (con el botón rojo) a la unidad de control. Asegúrese de escuchar un chasquido. Para desconectarlo, pulse simplemente el botón rojo y retire el conector de la unidad de control.

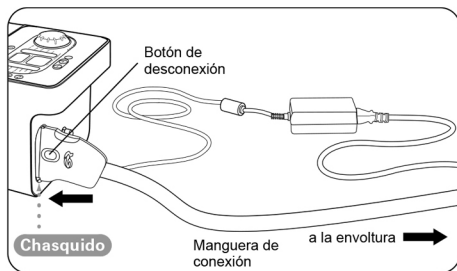

### Paso 6

Coloque la banda en la zona a tratar y conecte el extremo más pequeño de la manguera de conexión (con un botón azul o gris) a la envoltura. Asegúrese de escuchar un chasquido. Para desconectarlo, pulse simplemente el botón azul o gris y retire el conector de la envoltura.

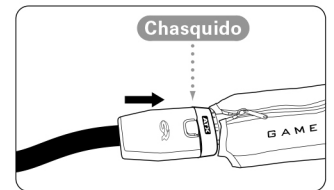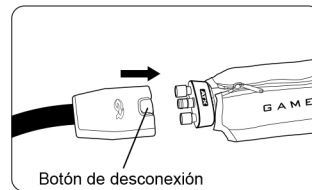

### Paso 7

Seleccione el modo de operación **programación**. El modo de programación le permite elegir uno de seis programas automatizados que suministran continuamente tratamiento durante un intervalo de tiempo fijo seguido de inactividad (ningún tratamiento) durante un tiempo fijo, a un ajuste de presión determinado (consulte la lista de programas disponibles a continuación).

### Modo de programación

**Elija el programa 2** Tendrá que reponer el hielo y el agua como se indicó anteriormente en el paso 2.




**Programa 2:** 30 minutos de funcionamiento, 30 minutos de inactividad. Presión baja.

1º Encendido → 2º Programa 2 → 3º Inicio


**Primero pulse el botón de encendido**

**Pulse 2 veces el botón de programación, para elegir el programa 2**

**Pulse el botón de funcionamiento**

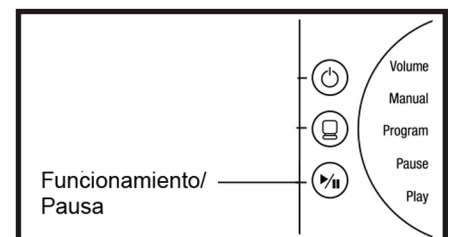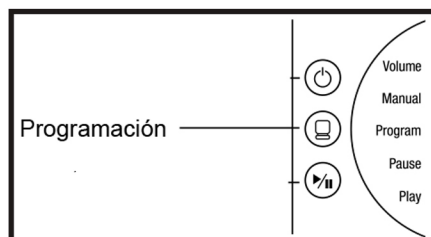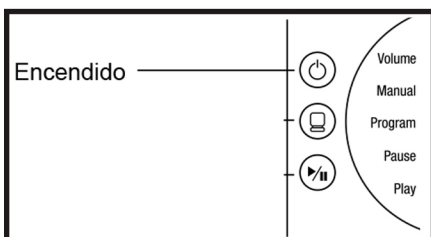

### Paso 8

 Pulse el botón Funcionamiento/Pausa (play/pause) para iniciar el tratamiento. Pulse funcionamiento/Pausa (play/pause) en cualquier momento para detener el tratamiento.

### Paso 10

Reponga los niveles de hielo y agua según sea necesario, para mantener su temperatura deseada. Vigile que el nivel de agua no sobrepase el límite seguro.

Guarde la unidad de control con la tapa totalmente abierta para que el interior se seque y para preservar el sello del depósito. Guarde la unidad de control en la bolsa de transporte o en otro lugar seguro. Recuerde que su unidad de control GRPro 2.1 es una pieza valiosa de equipamiento y debe tratarse con mucho cuidado, como si fuese un ordenador portátil.

### Paso 9

Ajuste su temperatura deseada girando el selector. Para una terapia más fría, gire el selector a la derecha, hacia el icono con 3 copos de nieve. Para una terapia más cálida, gire el selector a la izquierda, hacia el icono con 1 copo de nieve.












### Paso 11

Una vez termine su uso:

- Desenchufe el adaptador de CA y la manguera de conexión de la unidad de control
- Pulse el botón de apertura de la puerta para abrirla
- Vierta con cuidado el hielo y el agua
- Limpie el agua que quede

## GRPro 2.1 - Botones

 <b>Encendido:</b> enciende y apaga la unidad.	 <b>Selección de presión:</b> Utilice este botón para seleccionar uno de cuatro ajustes de la presión: Off (Presión nula), Low Pressure (Presión baja, 5-15 mmHg), Medium Pressure (Presión media, 5-50 mmHg) y High Pressure (Presión alta, 5-75 mmHg). La selección de la presión no está disponible
 <b>Programación:</b> selecciona uno de los programas.	 <b>Botón C/F:</b> selecciona grados Celsius o Fahrenheit.
 <b>Funcionamiento:</b> inicia o pausa un tratamiento.	 <b>Luz de fondo:</b> enciende o apaga la luz de fondo.
 <b>Añadir tiempo:</b> añade tiempo en modo manual.	
 <b>Reducir tiempo:</b> reduce tiempo en modo manual.	
 <b>Volumen:</b> selecciona la opción con sonido o sin sonido.	

## GRPro 2.1 - Programas

- Programa 1:** 30 minutos de funcionamiento, 30 minutos de inactividad. Presión nula.
- Programa 2:** 30 minutos de funcionamiento, 30 minutos de inactividad. Presión baja.
- Programa 3:** 30 minutos de funcionamiento, 30 minutos de inactividad. Presión media.

- Programa 4:** 30 minutos de funcionamiento, 60 minutos de inactividad. Presión nula.
- Programa 5:** 30 minutos de funcionamiento, 60 minutos de inactividad. Presión baja.
- Programa 6:** 30 minutos de funcionamiento, 60 minutos de inactividad. Presión media.

**Programa d:** modo de drenaje.

## Aclaraciones sobre las recogidas

Las recogidas de los alquileres de 6 días se realizarán los **miércoles, entre las 15h y las 17h, según el número de recogidas.**

Tenga en cuenta que, los siguientes pacientes que necesiten la máquina, tienen que encontrarla **limpia, desinfectada y revisada** y, en Sport Farma, necesitamos unas horas para poder hacer todo ese proceso antes de las operaciones del día siguiente.

Agradecemos su comprensión.

