



## JOBST® UlcerCARE™

### INDICACIONES

El sistema de compresión JOBST® UlcerCARE™ está indicado para los siguientes casos:

- Tratamiento de las úlceras venosas tras reducción del edema.
- Prevención de la reaparición de la úlcera venosa.

### MODO DE ACCIÓN

Los dos componentes del sistema de compresión JOBST® UlcerCARE™, calcetín y media, proporcionan una compresión combinada de 40 mmHg<sup>1</sup> en el tobillo con un gradiente de presión decreciente de distal a proximal (17 mmHg el calcetín interno)<sup>2</sup>. Este gradiente de presión reduce la estasis venosa, incrementa la velocidad de la sangre en el sistema venoso, promueve el retorno venoso, ayuda a la función de la bomba muscular y ayuda a reducir y controlar el edema.

### CONTRAINDICACIONES

El sistema de compresión JOBST® UlcerCARE™ está contraindicado cuando se dan algunas de las siguientes circunstancias:

- Isquemia (p. ej., enfermedad arterial avanzada).
- Insuficiencia cardiaca congestiva no controlada.
- Flebitis séptica no tratada
- Flegmasia cerúlea dolens.

### RECOMENDACIONES DE USO

- JOBST® UlcerCARE™ se recomienda una vez se ha reducido el edema mediante un vendaje de compresión de baja elasticidad (p.ej., Compri2®).
- Cubra cualquier herida abierta con un apósito adecuado antes de aplicar el calcetín de compresión. La media con cremallera se coloca sencillamente sobre el mismo.

### TIPO PRODUCTO

Sistema de compresión 2 en 1 para un tratamiento eficaz de las úlceras venosas de la pierna.

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Proporciona una compresión graduada de 40 mmHg<sup>1</sup>** para alcanzar la presión que los médicos recomiendan para la curación de úlceras venosas de la pierna<sup>3</sup>.
- **Ofrece un factor de gran rigidez** para proporcionar una compresión efectiva.
- **Es un sistema 2 en 1** que facilita su uso por parte del paciente o cuidadores.
- **Facilita la rápida absorción de la humedad** para mayor comodidad del paciente.
- **Disponible en siete tallas** para una mejor adaptación a una amplia variedad de formas de pierna.
- **La media está disponible en beige y negro** para una mejor adaptación al cliente.
- **Es compatible con calzado y ropa común** para permitir un estilo de vida normal en pacientes.

<sup>1</sup> Compresión combinada nominal específica para un tamaño de tobillo promedio.

<sup>2</sup> Compresión nominal para un tamaño de tobillo promedio (en nivel b) 15-20mmHg

<sup>3</sup> Documento de posición EWMA, "Understanding compression therapy" 2003. Revisado: 18/05/2016

## CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA MEDIA TERAPÉUTICA Y EL CALCETÍN

### JOBST® UlcerCARE™ Calcetín interno:

- Proporciona una compresión suave para pacientes no ambulatorios.
- Se puede usar 24 horas al día.
- Tiene el talón y la punta integrados.
- Contiene seda para promover la salud de la piel y facilitar la colocación.
- Se puede lavar a 60°C.

### JOBST® UlcerCARE™ Media:

- Está diseñada para la autogestión del paciente.
- Permite una fácil colocación sobre el calcetín.
- Tiene el talón y los dedos abiertos integrados.
- Está disponible en beige y negro.
- Está disponible con y sin cremallera.
- Se puede lavar a 40°C.

## LAVADO Y CONSERVACIÓN

- Lavable a máquina en agua templada (40°C la media y 60°C el calcetín).
- No usar lejía.
- No secar a máquina el calcetín. La media puede secarse a máquina a baja temperatura.
- No lavar en seco.
- No planchar.
- Use un detergente neutro en el lavado. No use suavizantes. Enjuague bien la prenda y no la retuerza al escurrirla.

## COMPOSICIÓN

- Nylon/poliamida
- Spandex/elastano
- Seda

- Aunque el calcetín de compresión puede llevarse las 24 horas del día, el paciente debe quitarse la media durante el descanso en cama.
- El calcetín debe cambiarse de acuerdo a las necesidades de la higiene diaria y revisiones de la herida.
- Tras la curación completa de la úlcera venosa, se recomienda continuar el uso de JOBST® UlcerCARE™ o cualquier otra media de compresión adecuada (p. ej., *JOBST® Medical LegWear*) para ayudar a prevenir la reaparición.

## INSTRUCCIONES DE USO

### Calcetín de compresión JOBST® UlcerCARE™:

1. Coja el calcetín de compresión con las dos manos de forma que los dedos del pie alcancen fácilmente el extremo.
2. Tire del calcetín de compresión por el pie, ajustando el talón.
3. Pase con cuidado el calcetín de compresión por la pierna, prestando atención especial al pasarlo por encima de la herida.
4. Tire del calcetín hasta la rodilla. No enrollar ni doblar el borde superior.
5. Alise cualquier arruga y ajuste el talón y dedos del calcetín de compresión para que quede cómodo.

### Media terapéutica de compresión JOBST® UlcerCARE™:

#### Media sin cremallera:

1. Coloque el calcetín de compresión según lo descrito anteriormente.
2. Con la media del revés, vuelva del derecho la parte del pie hasta la zona del talón y manténgala con las dos manos. La costura debe quedar en la parte inferior.
3. Estire la prenda todo lo que pueda y en un solo movimiento colóquela en su pie. Asegúrese de que el bolsillo para el talón queda en la parte inferior del pie.
4. Coloque la prenda de forma adecuada en la zona de los dedos estirando de la tela y no de las costuras.
5. Tire de la prenda y pase su tobillo. Asegúrese de que la prenda y el talón están colocados adecuadamente.
6. Ajuste la zona de los dedos para que quede confortable. Para ello tire de la media hacia los dedos y colóquelo de forma que la media quede sin tensión en esa zona.
7. Ahora vaya subiendo la prenda hacia la rodilla –en movimientos de unos 5cm- evitando que se vayan creando pliegues.
8. Ajuste las arrugas o cualquier zona incómoda tirando suavemente de la media hasta que la presión sea uniforme.

#### Media con cremallera:

1. Coloque el calcetín de compresión según lo descrito anteriormente.
2. Abra la cremallera de la media y deslice la misma por el pie.
3. Ajuste el talón de la media con el del pie.
4. Una los dos lados de la media unos cuatro centímetros por encima de la base de la cremallera y manténgalos unidos con una mano. Suba la cremallera con la otra mano y tire de la misma para cerrarla.

**PRESENTACIÓN**

MEDIA SIN CREMALLERA (1 media + 2 calcetines internos)









<b>Código de producto</b>	<b>Talla</b>	<b>Color</b>	<b>Circunf. tobillo B</b>	<b>Circunf. Pantorrilla C</b>	<b>Unidad mínima de venta</b>	<b>Unidades / envase</b>	<b>EAN Unidad</b>	<b>EAN Embalaje</b>
73630-21	S	Beige	18-21	29-35	1	10	4042809216677	4042809216684
73630-22	M	Beige	21-24	34-41	1	10	4042809389746	4042809389753
73630-23	L	Beige	24-27	40-47	1	10	4042809389760	4042809389777
73630-24	XL	Beige	27-30	46-54	1	10	4042809389784	4042809389791
73630-25	2XL	Beige	30-33	48-56	1	10	4042809389807	4042809389814
73630-26	3XL	Beige	33-36	50-58	1	10	4042809389821	4042809389838
73630-27	4XL	Beige	36-39	52-60	1	10	4042809402193	4042809402209
73630-41	S	Negro	18-21	29-35	1	10	4042809396522	4042809396539
73630-42	M	Negro	21-24	34-41	1	10	4042809396546	4042809396553
73630-43	L	Negro	24-27	40-47	1	10	4042809396560	4042809396577
73630-44	XL	Negro	27-30	46-54	1	10	4042809396584	4042809396591
73630-45	2XL	Negro	30-33	48-56	1	10	4042809396607	4042809396614
73630-46	3XL	Negro	33-36	50-58	1	10	4042809402254	4042809402261
73630-47	4XL	Negro	36-39	52-60	1	10	4042809402278	4042809402285

**MEDIA CON CREMALLERA (1 media + 2 calcetines internos)**

Código de producto	Talla	Lado de cierre	Color	Circunf. Tobillo B	Circunf. pantorrilla C	Unidad mínima de venta	Unidades / envase	EAN Unidad	EAN Embalaje
73631-61	S	Dcho	Beige	18-21	29-35	1	10	4042809397987	4042809397994
73631-62	M	Dcho	Beige	21-24	34-41	1	10	4042809398021	4042809398038
73631-63	L	Dcho	Beige	24-27	40-47	1	10	4042809398045	4042809398052
73631-64	XL	Dcho	Beige	27-30	46-54	1	10	4042809398069	4042809398076
73631-65	2XL	Dcho	Beige	30-33	48-56	1	10	4042809398083	4042809398090
73631-66	3XL	Dcho	Beige	33-36	50-58	1	10	4042809402476	4042809402483
73631-67	4XL	Dcho	Beige	36-39	52-60	1	10	4042809402490	4042809402506
73631-71	S	Dcho	Negro	18-21	29-35	1	10	4042809398106	4042809398113
73631-72	M	Dcho	Negro	21-24	34-41	1	10	4042809398120	4042809398137
73631-73	L	Dcho	Negro	24-27	40-47	1	10	4042809398144	4042809398151
73631-74	XL	Dcho	Negro	27-30	46-54	1	10	4042809398168	4042809398175
73631-75	2XL	Dcho	Negro	30-33	48-56	1	10	4042809398182	4042809398199
73631-76	3XL	Dcho	Negro	33-36	50-58	1	10	4042809402551	4042809402568
73631-77	4XL	Dcho	Negro	36-39	52-60	1	10	4042809402575	4042809402582
73631-21	S	Izdo	Beige	18-21	29-35	1	10	4042809389845	4042809389852
73631-22	M	Izdo	Beige	21-24	34-41	1	10	4042809389869	4042809389876
73631-23	L	Izdo	Beige	24-27	40-47	1	10	4042809389883	4042809389890
73631-24	XL	Izdo	Beige	27-30	46-54	1	10	4042809389906	4042809389913
73631-25	2XL	Izdo	Beige	30-33	48-56	1	10	4042809389920	4042809389937
73631-26	3XL	Izdo	Beige	33-36	50-58	1	10	4042809389944	4042809389951
73631-27	4XL	Izdo	Beige	36-39	52-60	1	10	4042809402452	4042809402469
73631-41	S	Izdo	Negro	18-21	29-35	1	10	4042809396621	4042809396638
73631-42	M	Izdo	Negro	21-24	34-41	1	10	4042809396645	4042809396652
73631-43	L	Izdo	Negro	24-27	40-47	1	10	4042809396669	4042809396676
73631-44	XL	Izdo	Negro	27-30	46-54	1	10	4042809396683	4042809396690
73631-45	2XL	Izdo	Negro	30-33	48-56	1	10	4042809396706	4042809396713
73631-46	3XL	Izdo	Negro	33-36	50-58	1	10	4042809402513	4042809402520
73631-47	4XL	Izdo	Negro	36-39	52-60	1	10	4042809402537	4042809402544

**CALCETÍN (caja repuesto 3 calcetines)**

Código de producto	Talla	Color	Circunferencia tobillo B	Circunferencia pantorrilla C	Unidad mínima de venta	Unidades / envase	EAN Unidad	EAN Embalaje
73632-21	S	Blanco	18-21	29-35	1	10	4042809389968	4042809389975
73632-22	M	Blanco	21-24	34-41	1	10	4042809389982	4042809389999
73632-23	L	Blanco	24-27	40-47	1	10	4042809390001	4042809390018
73632-24	XL	Blanco	27-30	46-54	1	10	4042809390025	4042809390032
73632-25	2XL	Blanco	30-33	48-56	1	10	4042809390049	4042809390056
73632-26	3XL	Blanco	33-36	50-58	1	10	4042809390063	4042809390070
73632-27	4XL	Blanco	36-39	52-60	1	10	4042809402599	4042809402605

Certificación	Contiene látex	Esterilidad	Conservación	Fabricante
<b>Clase CE</b>  <b>Essity Spain SLU</b> ISO 9001:2015 ISO 13485:2016			 3 años  <b>Garantía</b> 6 meses	 BSN Medical Inc. 100 Beiersdorf Drive Rutherford College, NC 28671. USA   BSN Medical GmbH Quickbornstrasse 24 20253 Hamburg. Germany  <b>Distribuidor</b>  Essity Spain SLU
			 	

## Leyenda símbolos



No contiene látex



Manténgase en lugar seco



No exponer el producto a la radiación solar



Producto no esterilizado



Fabricante



Representante Europeo



Distribuidor

**Essity Spain, SL (Sociedad Unipersonal)**

Ctra. Valls a Puigpelat, Km 2 – 43812 Puigpelat (Tarragona)  
 Sede HMS: C/ Fructuós Gelabert,6 - 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)  
 Tel. Atención cliente: 93. 521.01.20 Fax. Atención cliente: 93.521.02.10  
 B28451383

[www.essity.es](http://www.essity.es)

Essity Internal

FTE-108 Ed.2 01-04-22