



## TIPO PRODUCTO

Medias de compresión elástica para el tratamiento de Insuficiencia Venosa Crónica, fundamentalmente en situaciones de post-operatorio.

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Un preciso gradiente de compresión**, convierten a Jobst Relief en el adecuado tratamiento en post-operatorio de varices, así como en situaciones de piernas cansadas y doloridas.
- Hilos con recubrimiento de spandex tratado, le da una gran suavidad al tacto.
- **Estructura de hilado en 3D**, garantiza un gran confort en el uso diario del producto a lo largo de toda la jornada.
- **Talón reforzado**, proporciona una gran durabilidad.
- **Varios modelos**, es capaz de satisfacer las necesidades de todos los usuarios.
- **Banda de silicona elástica**, gracias a los puntos de silicona separados.
- **Banda de sujeción de silicona**, unida a la media por una costura plana que evita rozaduras.
- **Dedos abiertos**, facilitan la colocación y la higiene diaria en el periodo posoperatorio

JOBST®

Relief®

## INDICACIONES

Clase II:

- Varicosis moderada a severas.
- Postoperatorio.
- Edema moderado.
- Post-escleroterapia.
- Varices moderadas durante embarazo.
- Tromboflebitis superficial.

Clase III

- Varicosis severas.
- Postoperatorio.
- Edema severo.
- Post-escleroterapia.
- Varices severas durante el embarazo.
- Síndrome Post-trombótico

## MODO DE ACCIÓN

- Facilita la función valvular por aproximación de las válvulas: se unen las válvulas por la presión externa.
- Aumento de la velocidad de flujo sanguíneo: al reducir la luz de la vena la velocidad de la sangre que circula por ella aumenta.
- Mejora de la función capilar: por reducción de la presión de reflujo los capilares son capaces de absorber mejor los fluidos.
- Reducción del edema

## RECOMENDACIONES DE USO

- El producto debe ponerse nada más levantarse por la mañana y quitárselas por la noche antes de acostarse.
- Evitar el uso del producto junto a ungüentos grasos, lociones corporales grasas o sustancias similares a menos que estén recomendadas por el fabricante.
- Se recomienda lavar la prenda cada día o al menos cada dos días.
- Las uñas largas y joyas pueden dañar la prenda a la hora de ponerlas.
- Los hilos flojos o sueltos no deben cortarse puesto que pueden formar agujeros o carreras en la media.
- Las heridas abiertas deben cubrirse convenientemente antes de ponerse las medias.
- El uso de medias de una talla inadecuada o mal colocada puede causar problemas.

## CUIDADO Y LIMPIEZA

- Las medias deben lavarse diariamente o, al menos, cada dos días.
- Debe utilizarse un detergente normal suave. No utilice aditivos de lavado como suavizante, lejía o quitamanchas.
- Lavar con agua a una temperatura máxima de 30°C.
- Aclarar bien las medias de compresión y enrollarlas en una toalla para quitarles el exceso de humedad. No escurrirlas. No secarlas en radiadores o expuestas a la luz directa del sol.

## INTRUCCIONES DE USO

1. Enrollar el interior de la media de compresión hacia afuera en dirección al talón. Separar la parte del pie doblada utilizando ambas manos e ir introduciendo el pie hasta el talón.
2. Ir subiendo la media por el empeine y el talón.
3. Ir subiendo la media de compresión desenrollándola hasta que vayan quedando derechas poco a poco.
4. Distribuir la media uniformemente masajeando con ambas manos hasta que estén ajustadas sin formar arrugas. Resulta conveniente en este punto ponerse guantes de goma.

## COMPOSICIÓN

- Nylon
- Spandex
- Silicona

## PRESENTACIÓN


**MEDIA AD**

Media Corta


**MEDIA AG**

Media Larga


**MEDIA AG-T**




Media Larga con sujeción a la cintura

## REFERENCIAS

Clase 2	AD	AG	AG-T Drcha	AG-T Izda
Talla S	78050-04	78042-08	78031-06	78031-05
Talla M	78051-04	78043-08	78032-06	78032-05
Talla L	78052-04	78044-08	78033-06	78033-05
Talla XL	78053-04	78045-08	78034-06	78034-05






Clase 3	AD	AG	AG-T Drcha	AG-T Izda
Talla S	78054-04	78059-08	78035-06	78035-05
Talla M	78055-04	78047-08	78036-06	78036-05
Talla L	78056-04	78048-08	78037-06	78037-05
Talla XL	78057-04	78049-08	78041-06	78041-05

### TABLA DE MEDIDAS

Talla	Circunferencia tobillo 	Circunferencia pantorrilla 	Circunferencia muslo 
S	18 – 21 cm	28 – 38 cm	40 – 62 cm
M	21 – 25 cm	30 – 42 cm	43 – 70 cm
L	25 – 29 cm	32 – 46 cm	54 – 78 cm
XL	29 – 33 cm	34 – 50 cm	60 – 81 cm

### UNIDAD DE COMPRA

1ª unidad de compra	2ª unidad de compra
1 unidad	10 unidades

Certificación	Contiene látex	Esterilidad	Conservación	Fabricante
<b>Clase CE</b> I, no estéril  <b>Essity Spain SLU</b> ISO 9001:2015 ISO 13485:2016				 BSN Medical Inc. 5825 Carnegie Blvd. Charlotte, NC 28209 USA  <b>EC REP</b> BSN Medical GmbH Quickbornstrasse 24 D-20253 Hamburg. Germany   <b>Distribuidor</b> Essity Spain SLU

### Leyenda símbolos



No contiene látex



Producto no esterilizado



Manténgase en lugar seco



Distribuidor



Representante autorizado



Fabricante

### Essity Spain, SL (Sociedad Unipersonal)

Ctra. Valls a Puigpelat, Km 2 – 43812 Puigpelat (Tarragona)  
Sede HMS: C/ Fructuós Gelabert,6 - 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)  
Tel. Atención cliente: 93. 521.01.20 Fax. Atención cliente: 93.521.02.10  
B28451383

[www.essity.es](http://www.essity.es)

Essity Internal

FTE-106 Ed.1 01-12-20