

Actimove® Genu ECO



Inmovilizador de rodilla

El inmovilizador de rodilla ECO está compuesto por una pieza principal de espuma forrada de tejido de rizo en su interior con 4 tiras desmontables, 2 férulas laterales posicionables y 1 férula preformada posterior. Cierre de "Velcro".

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Espuma preconformada a lo largo de toda la pierna**, mayor confort.
- **Sistema de cierre removible tipo "Velcro" con anillas en "D"**, permite ajustes personalizados. Facilita la aplicación y retirada.
- **Férulas de aluminio removibles y moldeables**, óptima adaptación anatómica.
- **Lavable a mano a 40°C**, mayor higiene.

INDICACIONES

Después de cirugía, lesiones de los tejidos blandos y fracturas menores en la zona de la rodilla.

MODO DE ACCIÓN

Proporciona soporte a la rodilla y ayuda a reducir el dolor después de un traumatismo o cirugía.

INSTRUCCIONES DE USO

Actimove® Genu ECO debería colocarse sobre un vendaje tubular ligero.

1. Desenrollar el inmovilizador completamente. Extraer las tiras y las férulas laterales.
2. Colocar la espuma alrededor de la pierna, con el extremo más ancho proximal. Centrar la apertura rotular sobre la rodilla, y asegurar las tiras verticales de "Velcro" pasándolas por la parte frontal de la pierna.
3. Moldear la forma de las férulas laterales de acuerdo con la forma de la pierna / rodilla, si es necesario, y colocarlos tanto en la parte media como lateral de la rodilla, paralelos al eje de la pierna.
4. Una vez colocado, unir las cuatro tiras a la espuma con las anillas en "D" de la parte delantera: las dos tiras largas para el muslo, las dos cortas para la pantorrilla.
5. Fijar las tiras a las anillas en "D" y fijar el final del cierre a la misma tira, alternando la parte superior e inferior.


CUIDADO Y LIMPIEZA

Extraer las férulas de sus bolsillos. Fijar los cierres y lavar a máquina a 30°C (fibras delicadas) o a mano en agua tibia y jabón suave. Enjuagar abundantemente. No escurrir ni retorcer. Secar a temperatura ambiente y asegurarse de que la espuma está completamente seca antes de volverlo a aplicar.

COMPOSICIÓN

65% Poliéster
18% Poliuretano
17% Nylon

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

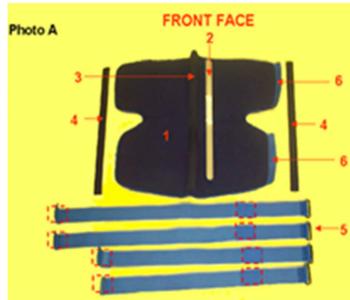

Parte	Componentes	Color	Material
1: Pieza central (3 componentes adhesivos enlazados)	Espuma	Crema	Poliuretano
	Tejido de rizo en el interior	Blanco	Espuma poliéster
	Terciopelo en el exterior de la cubierta	Azul oscuro	Poliéster
	Ribete	Azul claro	Poliéster
Férulas metálicas (2: Desmontable, 4: Posicionable)		Plata	Aluminio
3: Férula de Apoyo	Tira de tela gruesa	Azul claro	Poliéster
6: Tira 6: Cierre	Velcro	Azul claro	Nylon
5: Hebillas (6)		Negro	Plástico
Hilo de coser		Igual tejido	Espuma Poliéster

PRESENTACIÓN

Código Producto	Código	Longitud	Circunferencia del muslo	Unidades / Envase	Unidad mínima de venta	EAN Unidad	EAN Embalaje
72819-72	Pediátrico – S	30 cm	< 32 cm	20	1	4042809085440	4042809085464
72819-73	Pediátrico – L	40 cm	32 - 42 cm	15	1	4042809085471	4042809085495
72819-08	A1 – S	50 cm	< 55 cm	20	1	4042809015553	4042809015577
72819-09	A2 – L		50 – 68 cm	20	1	4042809015584	4042809015607
72819-10	B1 – S	60 cm	< 55 cm	16	1	4042809015614	4042809015638
72819-11	B2 – L		50 – 68 cm	16	1	4042809015645	4042809015669
72819-12	C1 – S	70 cm	< 55 cm	16	1	4042809015676	4042809015690
72819-13	C2 – L		50 – 68 cm	16	1	4042809015706	4042809015720

Certificación	Contiene látex	Esterilidad	Conservación	Fabricante
Clase CE I, no estéril BSN medical SLU ISO 9001:2008 			 Las características intrínsecas del producto no se alteran con el tiempo.   	 BSN Medical Ltd. Brierfield BB9 5NJ Inglaterra Distribuidor BSN medical SLU

Leyenda símbolos

	No contiene látex en formulación
	Caducidad
	Manténgase en lugar seco
	Fabricante

	Producto no esterilizado
	Temperatura de almacenamiento
	No exponer el producto a la radiación solar