



TIPO PRODUCTO

Spray adhesivo transparente para fijación de vendaje

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Adhesivo de alta tolerancia dérmica**, especialmente indicado en pacientes con piel sensible.
- **Disolventes con base de resina**, rapidez de secado.
- **Removible con alcohol**, retirada fácil y sin dolor.
- **Buena adherencia y fijación**, seguridad terapéutica.
- **Presentación en spray**, rápido y fácil de aplicar.
- Formación de un film protector incoloro sobre la piel.
- **Envase metálico**, seguridad en el transporte.
- **No contiene CFC**, ecológico.
- **Radiotransparente**, permite el control radiológico sin interferencias.

Tensospray®

INDICACIONES

- Fijación de almohadillados, curas (gasas o compresas) y vendajes de cualquier tipo sobre piel sana.
- Fijación del vello bajo pre-vendajes y vendajes adhesivos.
- Como protección adhesiva de alta tolerancia dérmica en pacientes con piel sensible frente a adhesivos de cualquier tipo.

INSTRUCCIONES DE USO

- Pulverizar la zona afectada a una distancia de 5 – 10 cm de la piel con un movimiento regular y circular para formar una capa uniforme. No pulverizar prolongadamente.
- No aplicar sobre piel irritada o lesionada.
- No inhalar intencionadamente ni vaporizar la zona de los ojos ni mucosas.
- Uso y almacenaje solamente en zonas bien ventiladas.

COMPOSICIÓN

Disolvente: producto con base de resina (disolvente alifático y dimetoximetano).

Gas: gas no halógeno.

PRESENTACIÓN

Código Producto	Descripción	Unidades / Envase	Unidad mínima de venta	EAN Unidad	EAN Embalaje
71602-00	Tensospray 300ml	12	1	4042809003314	4042809003338

Certificación	Contiene látex	Esterilidad	Conservación	Fabricante
Clase CE I, no estéril Essity Spain SLU ISO 9001:2015 ISO 13485:2016			 3 años 	  50°  BSN Medical GmbH Quickbornstrasse 24 20253 Hamburg  Distribuidor Essity Spain SLU

Leyenda símbolos



No contiene látex



Producto no esterilizado



Caducidad



Manténgase en lugar seco



No exponer el producto a la radiación solar



Fabricante



Temperatura de almacenamiento



Distribuidor

Essity Spain, SL (Sociedad Unipersonal)

Ctra. Valls a Puigpelat, Km 2 – 43812 Puigpelat (Tarragona)
 Sede HMS: C/ Fructuós Gelabert,6 - 08970 Sant Joan Despi (Barcelona)
 Tel. Atención cliente: 93. 521.01.20 Fax. Atención cliente: 93.521.02.10
 B28451383

www.essity.es